



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом. 10
ОГРН 5087746166954 | ИНН 77333670400 | КПП 773301001
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 | БИК 044525555
тел: +7 (495) 504-26-51 (52) | факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> | e-mail: info@med-mos.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровати функциональные медицинские Е-8 модель РМ-2014Д-05
производства Хэбэй Байцян Медикал Егуипмент Мануфактуринг Со. ЛТД, Китай

Назначение изделия

Кровать функциональная медицинская механическая предназначена для ухода за больными, оказания физиотерапевтической помощи и использования как в условиях стационара, в том числе реанимационных отделениях, так и на дому. Ложе кровати состоит из четырех секций, три из которых подвижны. Кровать имеет функции подъема и опускания секций спины и бедер. В ножной секции установлен растомат – планка регулировки угла наклона.

1. Конструкция кровати

Рама изделия выполнена из стального профиля.

Спинки кровати (изголовье и изножье) легкоъемные, выполнены из пластика с декоративными вставками.

Колеса одинарные, имеют шины из полиуретана и оснащены индивидуальными тормозами. Каждое колесо является самоориентирующимся, с возможностью поворота на 360°.

ГОСТы	
Соответствие требованиям национальных стандартов	ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4) ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 ГОСТ Р 50267.38-99
Обозначение знака соответствия при сертификации	ГОСТ Р 50460-92
Транспортная маркировка грузовых мест	ГОСТ 14192-96
Транспортировка	Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69
Упаковка	ГОСТ Р 50444-92
Условия хранения	Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях	2А по ГОСТ Р 51609-2000

2. Сборка и подготовка к эксплуатации

Для удобства хранения и транспортировки кровать поставляется в разобранном виде. Перед началом эксплуатации кровать требуется собрать.

Следуя данной инструкции, пользователи могут осуществлять сборку самостоятельно, но изготовитель настоятельно рекомендует доверить эту работу квалифицированным специалистам.

Внимание! Инструменты для сборки в комплект поставки не входят.

2.1. Сборка рамы кровати, установка изголовья и изножья

2.1.1. Откройте упаковку, снимите защитную пленку, уберите лишние упаковочные материалы. Проверьте комплектацию кровати. Отложите в сторону изголовье, изножье, боковые ограждения и крепежные элементы.


Вскрывать коробку удобнее таким образом, чтобы кровать располагалась ложем вниз.

Внимание! Не используйте острые предметы для вскрытия упаковки во избежание получения травм и причинения вреда деталям изделия.


2.1.2. На этом этапе сборки рекомендуем не доставать ложе из коробки для предотвращения повреждений. Ложе состоит из нескольких подвижных секций. В головной части ложа одна секция, в ножной – две подвижные секции и растомат (планка регулировки угла наклона золотистого цвета).

⇩ Ножная часть


Головная часть ⇩

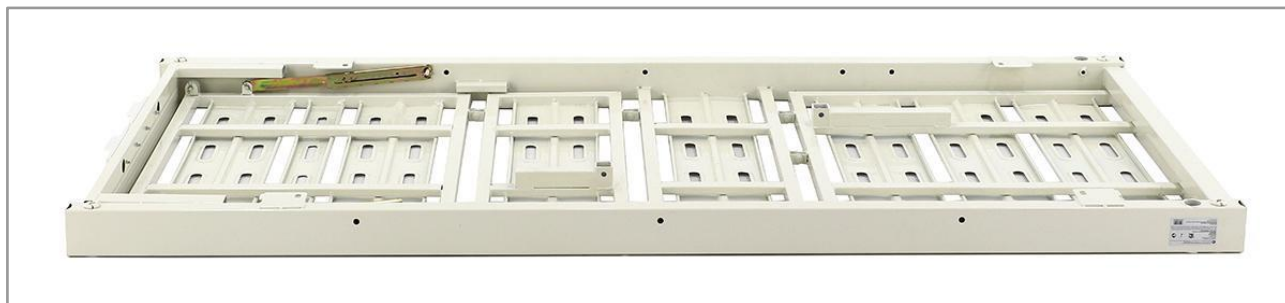


2.1.3. Установка ножных опор на раме. Опоры разные по форме: с двумя перекладинами (с перемычкой) для ножной секции ложа, с одной перекладиной для головной части ложа.

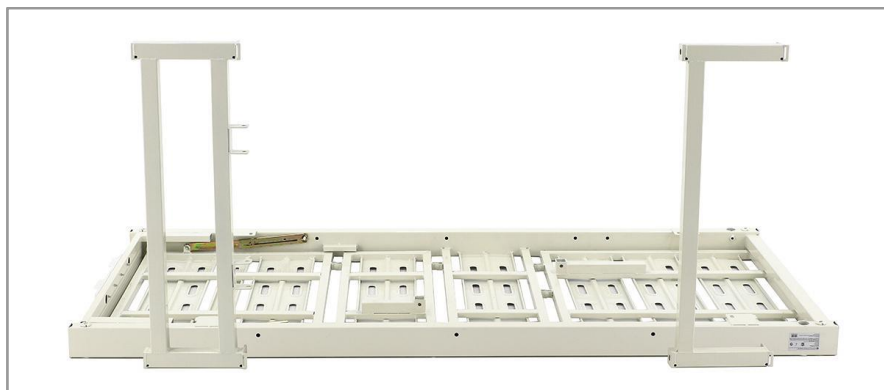


Для установки опор на ложе приварены пластины (кронштейны) с отверстиями и выступами.

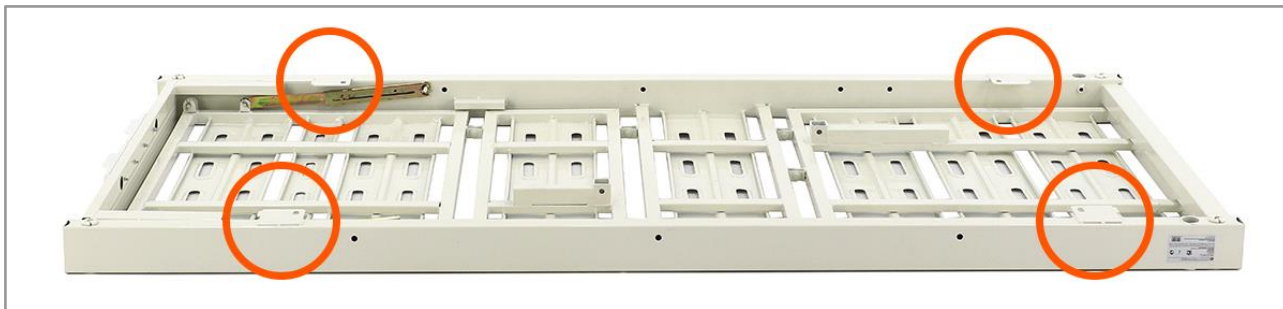

Совместите продолговатые пазы на опорах с выступами на кронштейнах ложа. Задвиньте опору так, чтобы совместились овальные отверстия на кронштейне ложа с круглыми отверстиями на опоре.

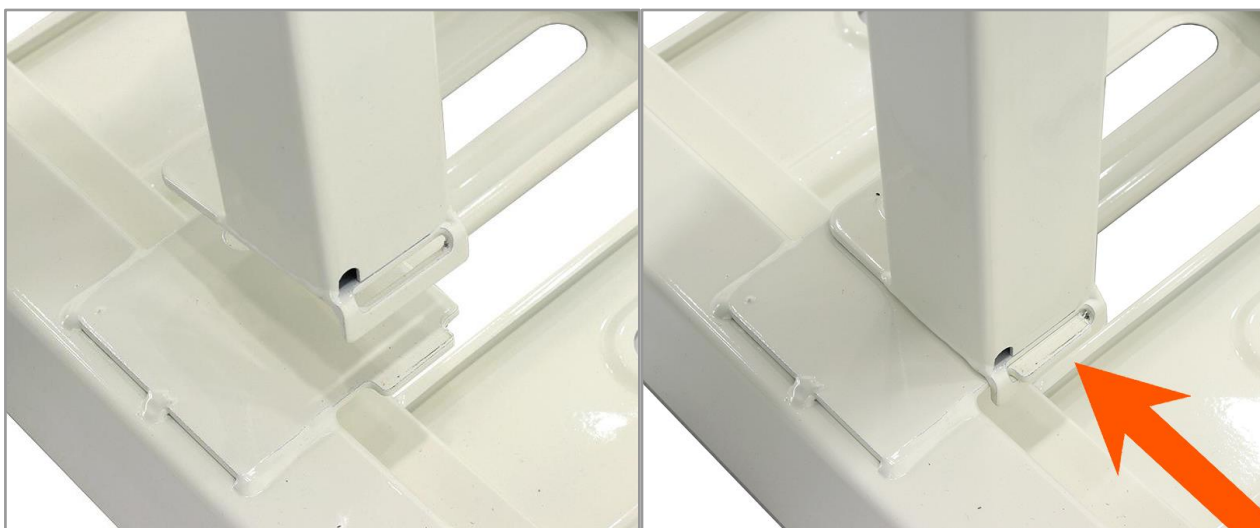

Зафиксируйте крепление болтами таким образом, чтобы головка болта находилась под кронштейном, а гайка сверху (вставьте болт изнутри наружу). Затяните гаечным ключом.

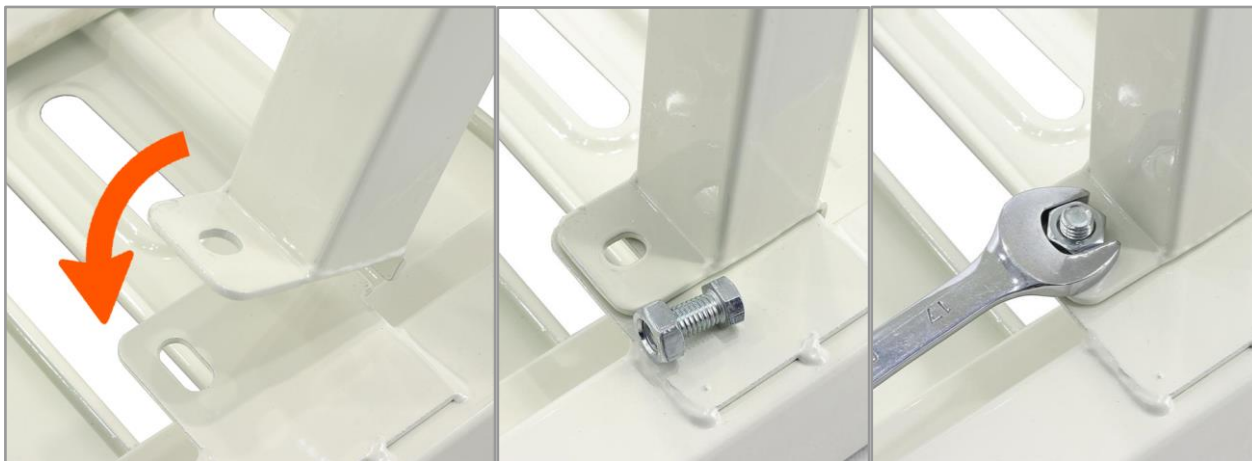

2.1.4. Вкрутите резьбовую часть колес в соответствующие отверстия ножных опор с резьбой. Чтобы колесо при вкручивании не проворачивалось, заблокируйте его, нажав на рычаг тормоза.



Вкрутите колесо до упора, не прилагая больших усилий, после чего обязательно надежно затяните гайку на колесе гаечным ключом.



2.2. Сборка и подключение подъемных механизмов

Механических приводов 2 шт. Привод с короткой трубой предназначен для ножной секции, привод с длинной трубой – для секции спины.

2.2.1. Уберите крепежи с концов привода.




2.2.2. Крепление длинного привода.



Часть привода с пластиковым защитным кожухом заведите под опору в ножной части ложа. На другом конце привода находится кронштейн. Вставьте кронштейн в квадратный паз на спинной секции ложа. Обратите внимание на ориентацию кронштейна во время установки.

⇩ **Ножная часть**


Спинная часть ⇩

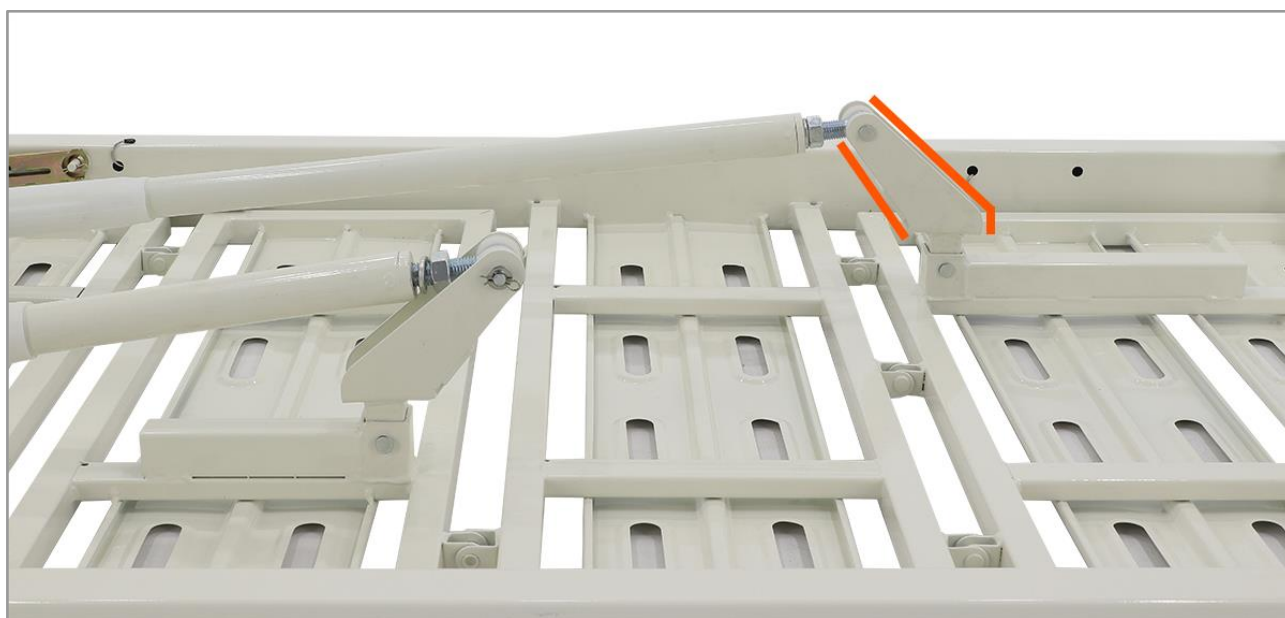

Установите две пластиковые шайбы-прокладки между кронштейном и регулировочным узлом привода.



Закрепите соединение кронштейна с помощью стального пальца и установите предохранительный металлический шплинт в отверстие на конце пальца.

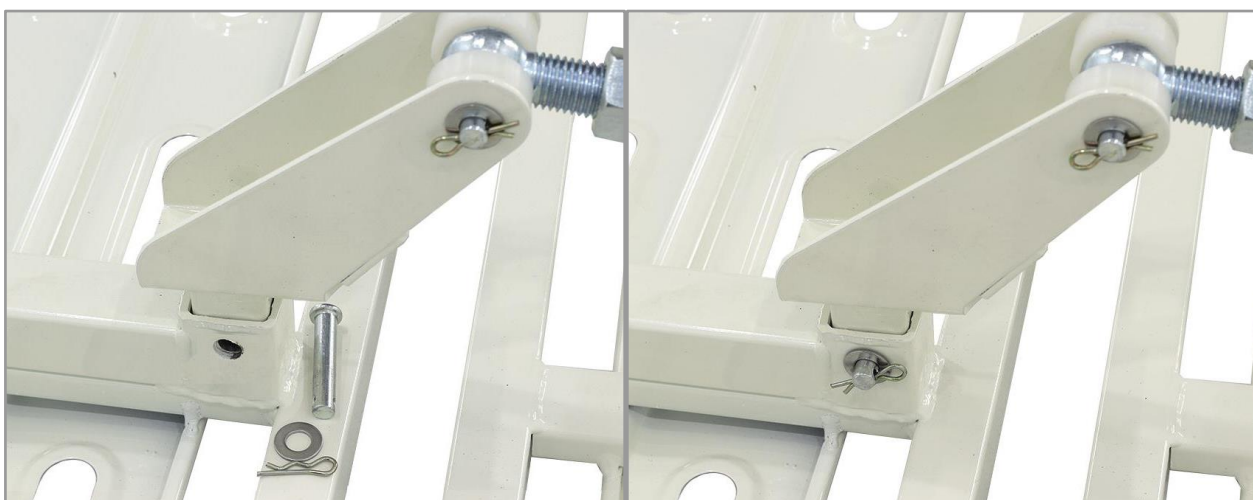


Часть привода с пластиковым защитным кожухом вставьте в проушины кронштейна на опоре в ножной части ложа. Закрепите соединение с помощью двух коротких болтов, старайтесь затянуть их примерно одинаково. Рекомендуем затянуть болты накидным ключом, чтобы не повредить поверхности.



После установки и регулировки привода затяните гайку, которая расположена возле кронштейна.




2.2.3. Крепление короткого привода.

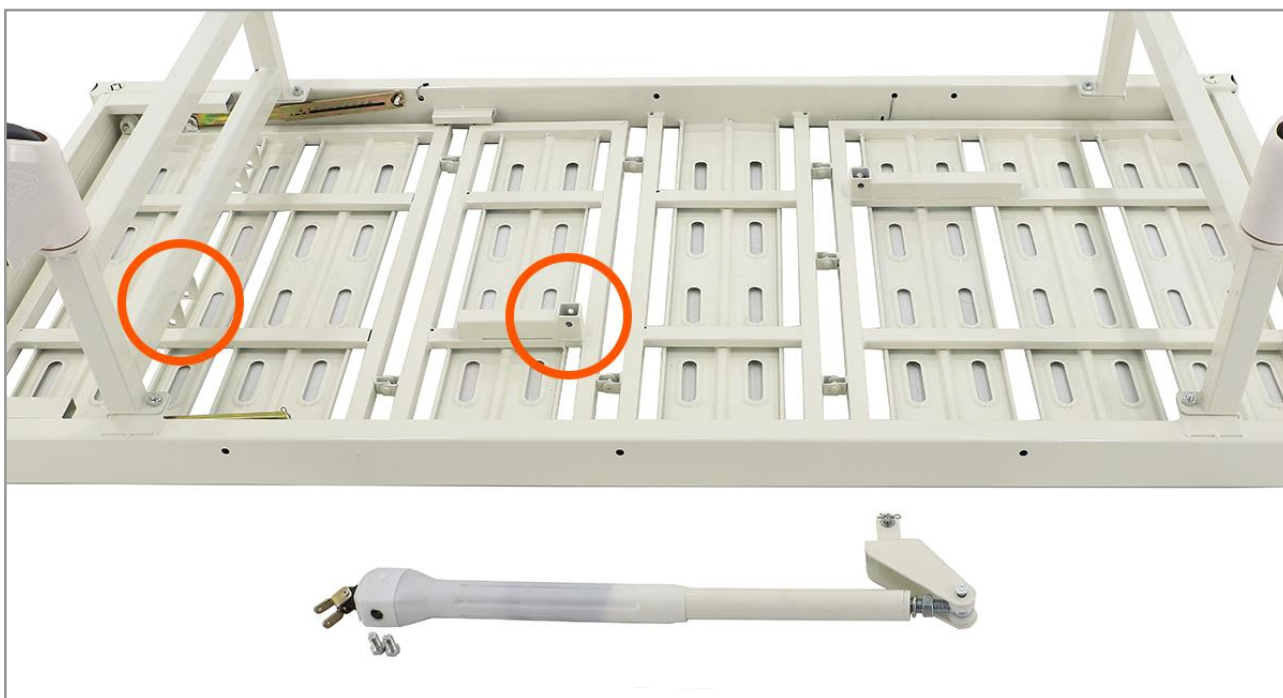

Часть привода с пластиковым защитным кожухом заведите под опору в ножной части ложа. На другом конце привода находится кронштейн. Вставьте кронштейн в квадратный паз на спинной секции ложа. Обратите внимание, что для короткого привода положение кронштейна отличается.

⇩ Ножная часть

Спинная часть ⇩

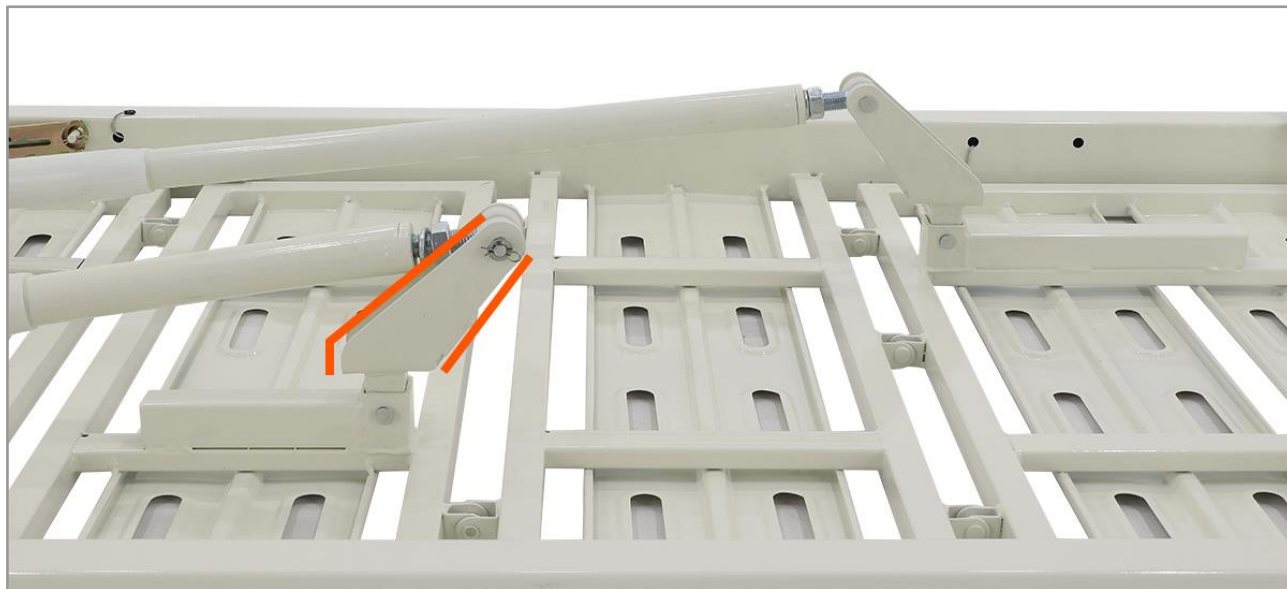

Установите две пластиковые шайбы-проставки между кронштейном и регулировочным узлом привода.



Закрепите соединение кронштейна с помощью стального пальца и установите предохранительный металлический шплинт в отверстие на конце пальца.



Часть привода с пластиковым защитным кожухом вставьте в проушины кронштейна на опоре в ножной части ложа. Закрепите соединение с помощью двух коротких болтов, старайтесь затянуть их примерно одинаково. Рекомендуем затянуть болты накидным ключом, чтобы не повредить поверхности.



После установки и регулировки привода
затяните гайку, которая расположена
возле кронштейна.

2.2.4. Установка ручек приводов.





Ручки крепятся к концу привода с пластиковым защитным кожухом. Уберите крепежи с концов ручек и с торца привода. Просуньте стержень ручки через отверстие в основании ложа кровати. Соедините ручку с кронштейном привода с помощью стального пальца, установите предохранительный шплинт в отверстие на конце пальца.

Задвиньте ручку привода в специальную выемку в основании ложа. Аналогично установите и прикрепите вторую ручку.

2.2.5. Не разблокируя тормоза колес, переверните кровать и поставьте ее на колеса.

Внимание! Риск травмирования. Для данной операции требуется не менее 2-х работников.

2.2.6. Проверьте правильность соединения деталей привода и корректность работы подвижных секций ложементов.


2.3. Установка изголовья и изножья

2.3.1. На углах рамы ложа установите уголки с опорными штырями, которые будут служить для крепления изголовья и изножья. Уголки с опорными штырями можно установить одним из трех способов в зависимости от роста пациента и необходимости свободного пространства между изголовьем и изножьем.



Уголки крепятся двумя винтами. Опорные штыри должны быть направлены наружу. Для увеличения длины ложа используйте пластиковые цилиндрические проставки на одном или обоих торцах кровати и длинные болты.

2.3.2. Изголовье и изножье незначительно отличаются: изножье имеет карман под карточку пациента. Поднимите фиксаторы на кронштейнах изголовья и изножья.

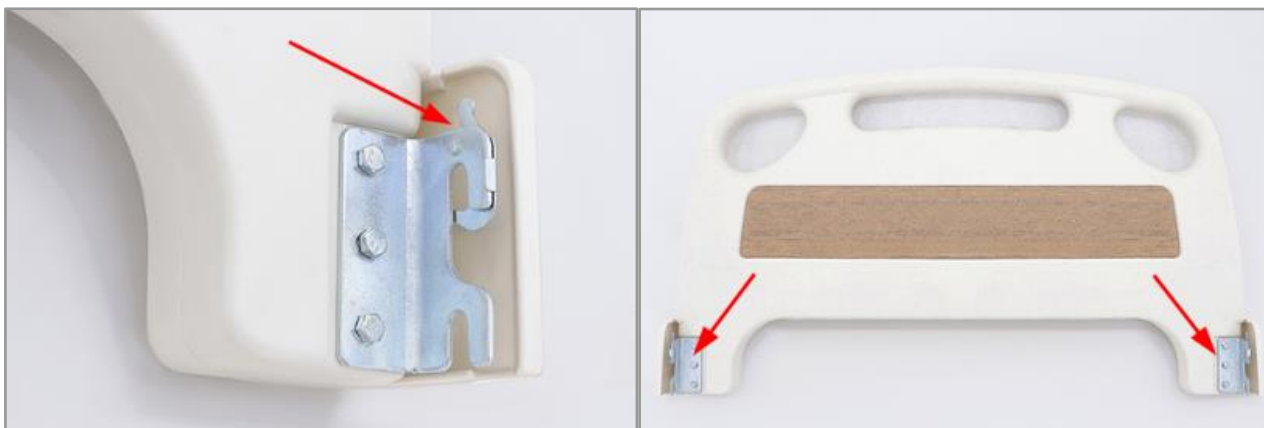

Вставьте крюкообразные кронштейны изножья и изголовья в опорные штыри на кровати до упора. Зафиксируйте соединение, опустив фиксаторы на изголовье и изножье. Таким образом, вы предотвратите их случайное снятие.




2.4. Установка боковых ограждений

2.4.1. Распакуйте боковые ограждения. Устанавливайте их таким образом, чтобы кнопка разблокировки (замок блокировки) была направлена к головной стороне кровати. Конструкцией допускается установка и в обратном направлении.

2.4.2. Совместите отверстия на боковом ограждении с имеющимися отверстиями на раме кровати (3 отверстия).



⚠ Обратите внимание: закругленные выступающие части заклепок должны смотреть наружу.

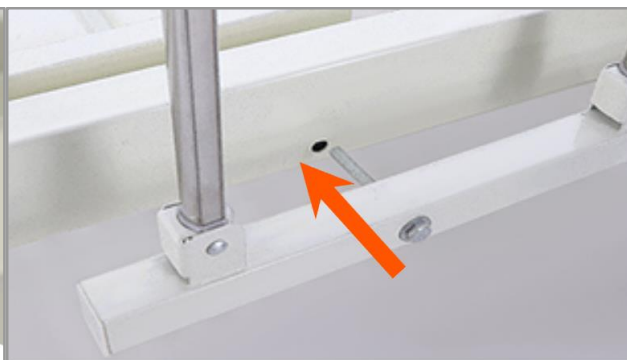

↑ Вставьте через отверстия боковых ограждений и рамы длинные болты с шайбой, наживите гайки. Чтобы было удобнее затягивать гайки, можно поднять секции кровати с помощью приводов. Затяните соединения с небольшим усилием с помощью двух гаечных ключей.


2.4.3. Установите боковое ограждение на противоположной стороне кровати аналогичным способом.

2.4.4. Боковые ограждения можно поднимать и опускать, проверьте их работу. Поднимите боковые ограждения вверх до щелчка. Таким образом, они будут зафиксированы. Чтобы их опустить, нажмите на клавишу разблокировки и сложите боковое ограждение.



2.5. Установка дополнительного оборудования

2.5.1. При необходимости установите дугу для подтягивания. Для ее установки в головной части кровати имеется две стальных втулки. Вставьте дугу во втулку до упора и зафиксируйте винтом барашкового типа.

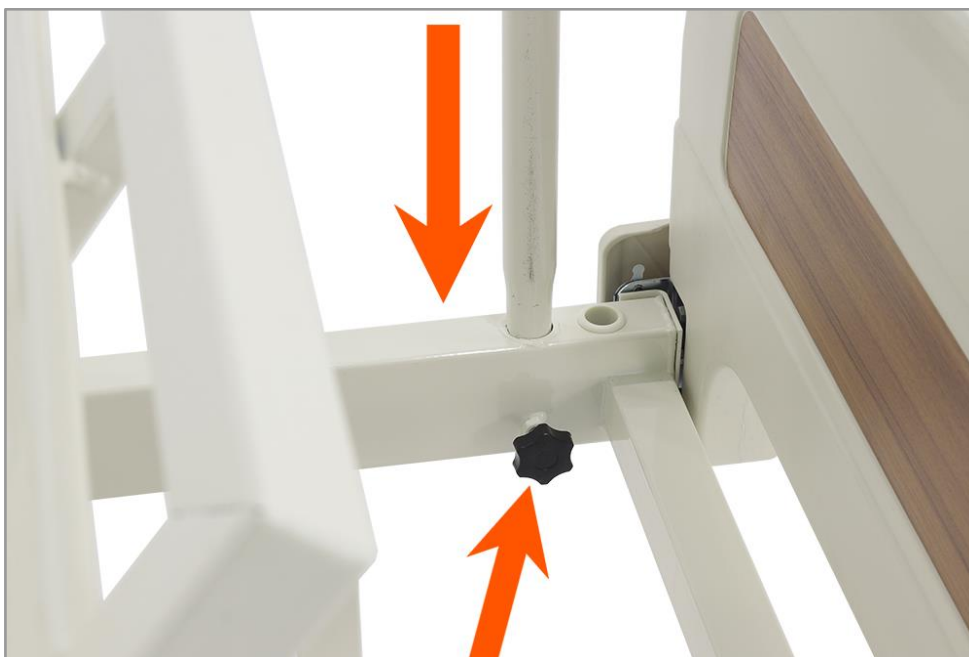


2.5.2. Для установки трансфузионной стойки предусмотрены 4 пластиковых втулки, по одной в каждом углу кровати. Трансфузионная стойка фиксируется во втулке за счет плотной посадки.



2.5.3. Вставьте крючки для мочеприемников в специальные отверстия с внутренней стороны рамы кровати. Крючки можно установить или снять при необходимости.



2.5.4. Установите полку на поперечину опоры в ножной части кровати. Полку лучше направить к центру кровати. Зафиксируйте винтами барашкового типа.

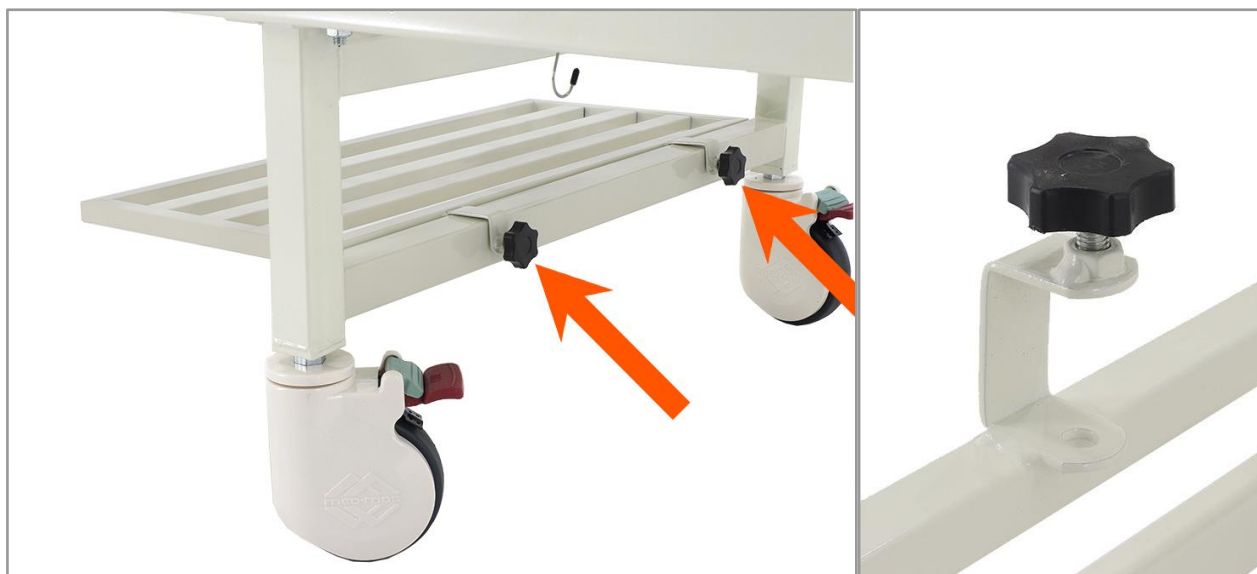

2.5.5. Уложите матрас на кровать. Кровать комплектуется матрасом во влагонепроницаемом чехле. Он разбит на секции, поэтому при установке положите его так, чтобы это соответствовало секциям кровати.

2.6. Проверка

Проверьте работоспособность механического привода. Проверьте складной механизм ручки привода.

2.7. Подготовка к эксплуатации

Перед началом эксплуатации обработайте поверхность изделия дезинфицирующим раствором или протрите влажной тканью. Убедитесь, что все соединительные элементы надежно закреплены и все резьбовые соединения надежно затянуты. Кровать готова к эксплуатации.



3. Эксплуатация

3.1. Допустимая распределенная нагрузка на кровать приведена в документе с техническими характеристиками, однако, это не означает, что любая секция ложементта способна выдержать указанный вес. В соответствии с методикой испытаний РЗН Минздрава РФ допустимая нагрузка должна быть равномерно распределена по площади секций ложа в следующем соотношении: 45% для секции спины, 25% для секции таза, 30% для ножных

секций. Таким образом, запрещено вставать и сидеть на отдельно поднятых секциях или иным образом перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.

Внимание! Риск повреждения оборудования!

Поломка оборудования, вызванная несоблюдением указанного выше порядка действий или неправильного использования функций, не является гарантийным случаем. В случае невозможности выполнить требуемые действия, незамедлительно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в сервисный центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.

Внимание! Риск травмирования или повреждения оборудования!

Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг кровати, исключающее контакт при использовании функционала кровати. При подъеме и опускании секций ложа кровати, при пользовании функциями регулировки высоты и наклона ложа остерегайтесь попадания конечностей или посторонних предметов между элементами конструкции кровати или кроватью и окружающими предметами.

3.2. Кровать предназначена для размещения пациента в положении лежа, сидя, полусидя. Для выбора необходимого положения ложа кровать оснащена механическими приводами. Ручки приводов складные и расположены в торце кровати. Выдвиньте ручку для изменения положения секции, затем сложите и задвиньте ее в держатель ручки.

Внимание! Выбор необходимого положения пациента должен определять квалифицированный медицинский персонал.

3.3. Изголовье и изножье оборудованы легкосъемными фиксаторами для удобства проведения необходимых пациенту процедур. Для снятия изголовья или изножья поднимите фиксаторы и снимите деталь с опорных уголков.

3.4. Боковые ограждения фиксируются автоматически при подъеме до верхнего положения. Замок блокировки издает при этом характерный щелчок. Расфиксация замка производится нажатием на клавишу, после чего боковые ограждения складываются до нижнего положения.



Внимание! Риск падения. Если щелчок не прозвучал, это означает, что боковое ограждение не зафиксировано и может опуститься. Пациент может упасть с кровати. Если боковое

ограждение перестало фиксироваться, следует немедленно прекратить эксплуатацию кровати и вызвать специалиста для проведения технического обслуживания или обратиться в сервисный центр для устранения неисправности.

Внимание! Не используйте боковые ограждения в качестве опоры. Максимально допустимая нагрузка в вертикальном и горизонтальном направлении – не более 15 кг.

3.5. Дуга для подтягивания служит для помощи пациенту самостоятельно принимать необходимое положение. Дугу для подтягивания нужно установить в головной части кровати с правой или левой стороны.

Внимание! Риск падения. Решение пользоваться дугой для подтягивания следует принимать индивидуально в каждом конкретном случае.

Внимание! Перед эксплуатацией дуги для подтягивания убедитесь, что она надежно зафиксирована на раме кровати и не поворачивается под нагрузкой.

3.6. Трансфузионная стойка может устанавливаться в любое из 4-х технологических отверстий в каждом углу рамы кровати. Стойка оснащена держателями эргономичной формы (4 шт.), позволяющими легко и надежно устанавливать и менять прописанные пациенту препараты.

Внимание! Максимально допустимая вертикальная нагрузка на один крючок – не более 1 кг, но не более 4 кг равномерно распределенной суммарной нагрузки на трансфузионную стойку в целом.



3.7. Чтобы поставить колесо на тормоз, нажмите на рычаг тормоза.



3.8. Крючки для мочеприемников можно установить или снять при необходимости.

3.9. Полка для судна/обуви: максимально допустимая нагрузка составляет 5 кг.

3.10. Ручки приводов складные и расположены в торце кровати. Выдвиньте ручку для изменения положения секции, затем сложите и задвиньте ее в держатель ручки.



3.11. Прикроватный столик (опция) устанавливается с любой стороны кровати. Накроватный столик (опция) устанавливается на поднятые в верхнее положение боковые ограждения в любом удобном для пациента месте. Максимально допустимая нагрузка на прикроватный и накроватный столики составляет 5 кг.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Производитель оставляет за собой право изменить конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.
- Иллюстрации, приведенные в данной инструкции, носят информационный характер и являются ориентировочными. Комплектация и вид изделия могут отличаться от приведенных на фото.

Внимание! Если изделие перестало функционировать или персонал не может осуществлять контроль при помощи ручек приводов, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.

Внимание!

1. Запрещена эксплуатация изделия, если в процессе работы возникают посторонние шумы.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с изделием.
3. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.

4. Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.
5. Утилизировать изделие после окончания срока службы и упаковку после сборки необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.
6. Не допускается перемещение кровати за боковые ограждения.
7. Не допускается перемещение кровати при заблокированных колесах.
8. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение по грунту и другой не соответствующей поверхности.
9. Колеса на кроватях предназначены для их перемещения на короткие расстояния по ровному полу внутри помещения, в котором они установлены. Использование кроватей в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекатывание кровати через препятствия порогового типа расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
10. В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте (см. раздел 4 данной инструкции).
11. Запрещается размещение каких-либо предметов или оборудования на раме или ее использование в качестве опоры для человека.
12. В случае, когда необходимо оставить пациента без присмотра, приведите положение кровати в нулевую позицию: все секции ложа расположите горизонтально.

4. Обслуживание, чистка и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год.
2. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять не реже чем раз в 3 месяца.
3. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
4. Регулярно проверяйте силовые узлы подъемных механизмов на наличие смазки с интервалом не реже 1 раза в 2 недели. При необходимости, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев, смазывайте аэрозольной смазкой глубокого проникновения.
5. В случае обнаружения неисправностей см. раздел 5 данной инструкции. Изделие, неисправности которого не могут быть устранены пользователем, должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами сервисного центра или возвращено производителю.

6. Запрещается использование изделия с признаками неисправностей.
7. В процессе эксплуатации изделие следует содержать в чистоте, своевременно обрабатывая растворами моющих средств на водной основе или дезинфицирующими средствами. Допускается использовать мягкие моющие средства и дезинфицирующие составы, не содержащие агрессивных химических веществ. Соблюдайте инструкции производителя по использованию средства или состава.
8. Очищайте изделие протирочным материалом (мягкой тканью, микрофиброй, салфетками и т. п.).
9. Используйте достаточное, но не чрезмерное количество воды и/или дезинфицирующего состава. При необходимости удалите лишнее количество воды и состава. Чистить следует, переходя от наименее загрязненных деталей изделия к наиболее загрязненным, периодически промывая или заменяя протирочный материал.
10. После обработки удалите остатки состава и дайте изделию полностью высохнуть перед использованием.

Внимание! Не используйте в качестве протирочного материала абразивные и металлические губки и им подобные приспособления, не применяйте острые предметы, способные нарушить защитный слой, нанесенный на изделие, т. к. это может привести к повреждению изделия и коррозии металлических частей.

Внимание! Не используйте составы для чистки и дезинфекции, содержащие абразивные и/или агрессивные добавки, способные нарушить защитный слой изделия, т. к. это может привести к его повреждению и коррозии металлических частей.

5. Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Боковое ограждение не фиксируется в поднятом положении	Не сработал замок блокировки ограждения	Поднимите боковое ограждение до момента срабатывания замка (до щелчка). Если замок блокировки неисправен, обратитесь в сервисный центр
Колесо не ставится на тормоз или не блокируется	Не нажат рычаг тормоза на колесе	Нажмите рычаг на колесе. Если блокировка тормоза неисправна, обратитесь в сервисный центр
Дуга для подтягивания поворачивается в	Дуга не зафиксирована винтом барашкового типа	Установите дугу для подтягивания в паз до упора и

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
посадочном месте		зафиксируйте винтом барашкового типа
Трансфузионная стойка свободно качается в посадочном месте	Стойка ошибочно установлена в отверстие дуги для подтягивания	Переставьте стойку в отверстие для трансфузионной стойки и закрепите плотной посадкой
Механический привод не опускает или не поднимает секцию ложа	Неправильно соединены элементы привода	Проверьте правильность соединения элементов привода. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Внимание! Если предпринятые действия не помогают устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

6. Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом сухом месте, не способствующем образованию коррозии и плесени.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими для транспорта данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

7. Комплект поставки

- инструкция по сборке – 1 шт.;
- ложе – 1 шт.;
- ножные опоры – 2 шт.;
- изголовье / изножье – 1 пара;
- уголки для крепления спинок кровати – 4 шт.;
- пластиковые проставки для уголков – 8 шт.;
- боковые ограждения – 2 шт.;
- механические приводы – 2 шт.;
- ручки для механических приводов – 2 шт.;
- дуга для подтягивания – 1 шт.;
- телескопическая стойка для инфузионных растворов – 1 шт.;
- крючки для мочеприемников – 2 шт.;

- колеса – 4 шт.;
- полка – 1 шт.;
- матрас – 1 шт.;
- крепления – 1 компл.;
- прикроватный или обеденный столик* (опция)
- прикроватная тумбочка* (опция)
- сменное белье* (опция)
- противопролежневый матрас* (опция)
- туалетное судно* (опция)
- ванночка для мытья головы* (опция)
- накроватный или обеденный столик* (опция)

*опционально, поставляется в зависимости от пожеланий заказчика и комплектации.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящей инструкции; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причиненных вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, срок эксплуатации замененных частей не обновляется.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: «_____» _____ 20____ г.

Актуальную информацию смотрите на сайте РОСЗДРАВНАДЗОРА

<http://www.roszdravnadzor.ru>

Меры предосторожности

- Строго соблюдайте требования, указания и рекомендации, содержащиеся в данной инструкции по сборке.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающей кроватью.
- Перед использованием проверяйте корректность функционирования всех подвижных частей кровати, проверяйте надежность затяжки крепежных элементов и отсутствие

ослабленных соединений, убедитесь в отсутствии в помещении помех (мебель, стены, подоконники и т.п.), препятствующих нормальному функционированию кровати.

- Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, или при возникновении посторонних шумов в процессе работы незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кровать, указанную на заводской наклейке. Запрещено вставать и сидеть на отдельно поднятых секциях, опираться на торцевые ограждения или иным образом перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.
- Избегайте попадания посторонних предметов и частей тела между движущимися элементами конструкции кровати в процессе эксплуатации, это может привести к травме или повреждению оборудования.
- Тормоза колес стоящей кровати (при наличии) должны быть заблокированы. Разблокировка колес производится только при необходимости перемещения кровати.
- Не допускается перемещение кровати при заблокированных колесах.
- Не допускается перемещение кровати вместе с пациентом, это может привести к травмам.
- Не допускается перемещение кровати за боковые ограждения.
- Колеса на кровати предназначены для ее передвижения на короткие расстояния по твердому ровному полу внутри помещения, в котором установлена кровать. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение ее по грунту и другой не соответствующей поверхности.
- Во избежание повреждений, избегайте ударов и столкновений кровати с твердыми предметами при ее перемещении.
- Использование кровати в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекачивание кровати через препятствия порогового типа, выбоины в полу и иные большие неровности расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
- Запрещается размещение не предусмотренных конструкцией предметов или оборудования на раме кровати или ее использование в качестве опоры для человека.
- В случае, когда необходимо оставить пациента без присмотра, поднимите боковые ограждения и приведите положение кровати в нулевую позицию: все секции лежа расположите горизонтально.
- В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте.
- Если изделие перестало функционировать должным образом или персонал не может осуществлять контроль при помощи ручек приводов, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

- Утилизировать изделие после окончания срока службы и упаковку после сборки необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.